

ERCP™

Instrumente zur Probeentnahme




// Mehrere Studien haben gezeigt, dass die **kombinierte Verwendung mehrerer ERCP-Gewebeprobentechniken** die Krebserkennungsrate verbessern kann. //

ERCP™ Probenahmegeräte

- Die Kombination der **HISTOGUIDE™ drahtgeführten Zange** mit einem klinisch erprobten **INFINITY™ ERCP-Probenahmegerät** für einen zweistufigen, multimodalen Probenahmeansatz kann die Diagnosemöglichkeiten verbessern und zu einer erhöhten Sensibilität bei ERCP-Verfahren führen.¹

Die HISTOGUIDE drahtgeführte Zange ...

Ermöglicht die Platzierung einer Zange im Gallengangssystem entlang eines Führungsdrahts, um die Strikturdiagnose zu erleichtern.

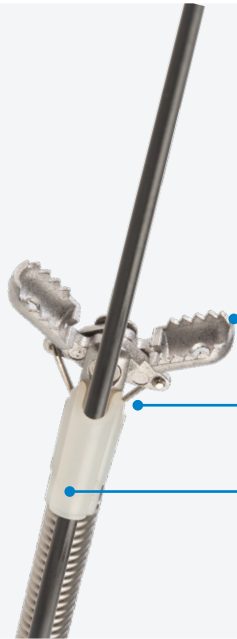

Zangen in Standardgröße mit gezackten Backen greifen und entnehmen Gewebe zur Unterstützung der Diagnose

Der federbelastete Griff stellt sicher, dass die Zange geschlossen bleibt, um die entnommenen Gewebeproben festzuhalten

Führungsdraht für den Zugang zum Gallengang

Das INFINITY ERCP-Probenahmegerät ...

Ist nachweislich eine äußerst effektive Bürste für die Gallenzytologie mit einer diagnostischen Sensitivität von bis zu 85 %.²

Die atraumatische distale Spitze und die röntgendichte Markierung im Katheter sind unter Röntgendurchleuchtung sichtbar und erleichtern die Platzierung.


Atraumatische distale Spitze

Weichere große Borsten fangen Abrieb auf

Zwischenräume zwischen den Borsten helfen, Zellen in den Katheter zu packen

Steifere Borsten helfen, einen Schnitt im Gewebe zu erzeugen

Röntgendichter Marker

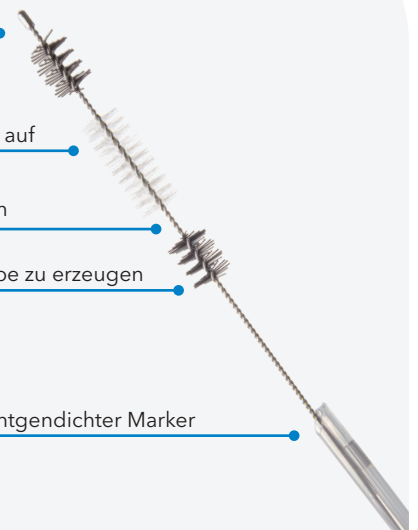

Weitere Informationen zu unserem ERCP-Portfolio erhalten Sie bei STERIS oder unter <https://healthcare.steris.com/de..>

HISTOGUIDE™ DRAHTGEFÜHRTE ZANGE

Produktnummer	Beschreibung	Katheter Ø (mm)	Führungsdraht Ø (mm)	Arbeitskanal Ø (mm)	Öffnungsbreite (mm)	Zangen Ø (mm)	Länge (cm)	Stück/Box
BX00711660	HISTOGUIDE™ Drahtgeführte Zange*	2,1	3,5	4,2	8,0	2,2	230	5

*Kompatibel mit einem 0,035-Zoll-Führungsdraht.

INFINITY™ ERCP-PROBENAHMEGERÄT

Produktnummer	Beschreibung	Katheter Ø (mm)	Länge (cm)	Steril	Stück/Box
BX00711652	INFINITY™ ERCP-Probenahmegerät*	3 / 9FR	200	Ja	5
BX00711653	INFINITY™ ERCP-Probenahmegerät*	2,5 / 7,5FR	200	Ja	5

*Kompatibel mit langen und kurzen Führungsdrähten.



Dokument zur klinischen Unterstützung

ERCP-ZUBEHÖR

Produktnummer	Beschreibung	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Stück/Box
BX00711654*	BOOST™ Kopfpositionierer	9,5	19	23	5
Produktnummer	Beschreibung	Abmessungen		Verpackungsgröße	Stück/Box
BX00711750	MIO™ Organizer für medizinische Geräte	~86 cm x ~76 cm		~25 cm x ~28 cm	20

*Nicht CE-zertifiziert

1. Korc, P. and Sherman, S. "ERCP tissue sampling." GIE Journal 2016; 84 (4)L 557-571.
2. T. Barrio, M. Wangermez, P. Levillain, M. Beauchant. The Infinity™ brush improves the results of brush cytology for malignant biliary strictures. Societe Nationale Francaise de Gastro-Enterologie (SNFGE). <http://www.snfge.org/jfhod2013/7407.html> [25.04.2013 10:13:01]



STERIS Deutschland GmbH
Eupener Straße 70
50933 Köln
Tel: 0221 / 466120-90
Fax: 0221 / 466120-40
E-Mail: csde@steris.com

healthcare.steris.com/de

Urheberrecht © 2025 STERIS. Alle Rechte vorbehalten. 761538DE Rev. F DE