


KURZANLEITUNG


PADLOCK CLIP™ Defektverschluss-System

ANWENDUNGSGEBIETE:


Das PADLOCK CLIP Defektverschluss-System ist für den Einsatz in der flexiblen Endoskopie vorgesehen. Es dient zur Kompression von Gewebe im Gastrointestinaltrakt, zur Blutstillung (Hämostase) sowie zur Behandlung von Läsionen der Wand gastrointestinaler Organe.

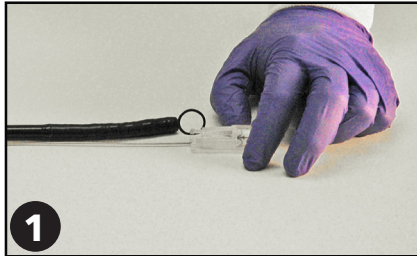


1
Legen Sie das Endoskop flach auf eine Oberfläche und platzieren Sie das Gehäuse des PADLOCK CLIP Systems neben dem distalen Ende des Endoskops.

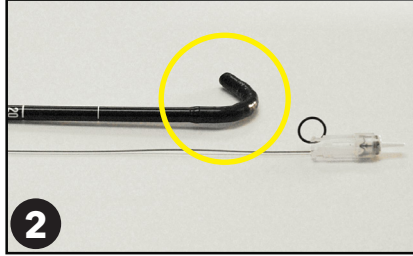


2
Ermitteln Sie die maximale Retroflexionsrichtung des Endoskops. Positionieren Sie die Krümmung wie dargestellt.

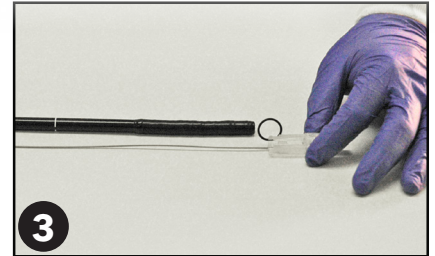

3
Führen Sie den Draht entlang der AUßENSEITE der Retroflexionskrümmung.

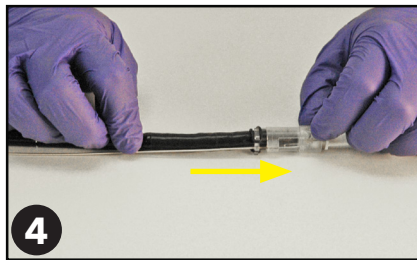


4
Schieben Sie das Endoskop vorsichtig in das Gehäuse, bis ein Anschlag erreicht wird. Drücken oder drehen Sie das Endoskop nicht über diesen sanften Anschlag hinaus in das Gehäuse.

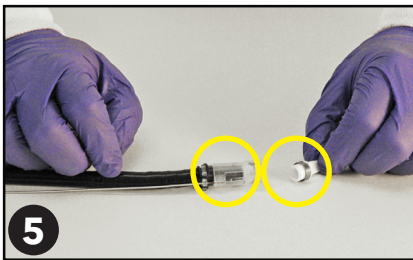


5
Greifen Sie den schwarzen O-Ring, dehnen Sie ihn und ziehen Sie ihn über die Öffnung. Befestigen Sie ihn am offenen Haken. Greifen Sie anschließend die Schutzkappe, drehen Sie sie ab und ziehen Sie sie ab.




6
Tragen Sie großzügig Gleitmittel auf die Außenseite des Clip-Gehäuses auf.

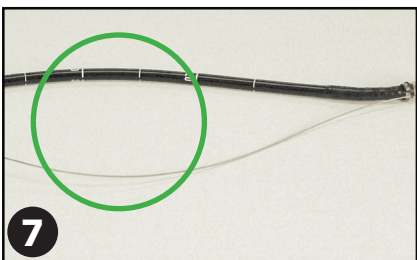

7
Lassen Sie den Draht beim Einführen des Endoskops locker und spannungsfrei nachlaufen.

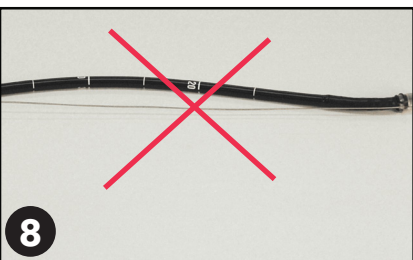

8
Beispiel einer zu starken bzw. zu straffen Drahtspannung.

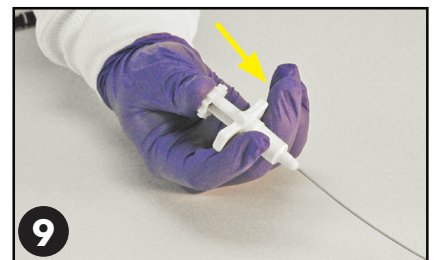

9
Das PADLOCK CLIP System wird durch einen kräftigen, schnellen Druck mit dem Daumen auf den Handgriff ausgelöst.



Scanen für
Set-Up Video

Diese Informationen dienen ausschließlich als Kurzanleitung bzw. Referenzhilfe. Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts die vollständige Gebrauchsanweisung (Instructions for Use).

healthcare.steris.com/de

Alle Unternehmens- und Produktnamen sind Marken von STERIS, deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.
©2026-07 STERIS. Alle Rechte vorbehalten. 761409DE Rev. D

 **STERIS**